


**SERININA®**

**Instruction Manual  
Manuale di istruzioni  
Bedienungsanleitung  
Manual de Instrucciones  
Manuel d'Instructions**



**LAVATESTA GONFIABILE  
INFLATABLE HAIR WASHING BASIN  
AUFBLASBARES HAARWASCHBECKEN  
LAVE-TÊTE GONFLABLE  
LAVATESTA INFLABLE**

Client support: [info@serinina.com](mailto:info@serinina.com)

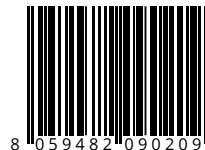

Imported by / Importato da Logiton srls - IT01383230776 - Italy - Made in China

sr-120

## Instruction Manual - Manuale di istruzioni - Bedienungsanleitung - Manual de Instrucciones - Manuel d'Instructions

**Gonfiare il lavabo:** Gonfiare il lavabo inserendo la valvola nera presente nel tappo

**Inflate the basin:** Inflate the basin by inserting the black valve into the cap

**Das Waschbecken aufpumpen:** Das Waschbecken aufpumpen, indem Sie das schwarze Ventil in den Deckel einsetzen

**Gonfler le lavabo:** Gonfler le lavabo en insérant la valve noire dans le bouchon

**Inflar el lavabo:** Inflar el lavabo insertando la válvula negra en el tapón

**Utilizzo del lavabo:** Fissarlo intorno al collo senza stringere troppo. Poggiare il lavabo gonfiabile con la testa all'indietro sul lavandino di casa o posizionare un secchio sotto se si decide di utilizzarlo per una persona allettata. Dopo l'utilizzo lavarlo e sgonfiarlo rimuovendo la valvola nera

**Using the basin:** Secure it around the neck without tightening too much. Place the inflatable basin with the head tilted back over the home sink or place a bucket underneath if you decide to use it for a bedridden person. After use, wash it and deflate it by removing the black valve.

**Verwendung des Beckens:** Es um den Hals befestigen, ohne zu fest anzuziehen. Das aufblasbare Becken mit zurückgelehntem Kopf über das Waschbecken zu Hause legen oder einen Eimer darunter stellen, wenn es für eine bettlägerige Person verwendet wird. Nach Gebrauch waschen und durch Entfernen des schwarzen Ventils entleeren.

**Utilisation du lavabo:** Le fixer autour du cou sans trop serrer. Placer le lavabo gonflable avec la tête inclinée en arrière sur le lavabo de la maison ou placer un seau en dessous si vous décidez de l'utiliser pour une personne alitée. Après utilisation, le laver et le dégonfler en retirant la valve noire.

**Uso del lavabo:** Sujételo alrededor del cuello sin apretar demasiado. Coloque el lavabo inflable con la cabeza inclinada hacia atrás sobre el fregadero de casa o coloque un cubo debajo si decide usarlo para una persona postrada en cama. Después de usarlo, lávelo y desinflé quitando la válvula negra.